




SECA 384 Digital Baby Scale verklemte Taste

Reparatur

Wenn sich einer der Bedientasten des Geräts klemmen, ist die Waage nicht mehr nutzbar. Durch ein Auseinandernehmen kann das Problem gelöst werden.

Geschrieben von: Bruno

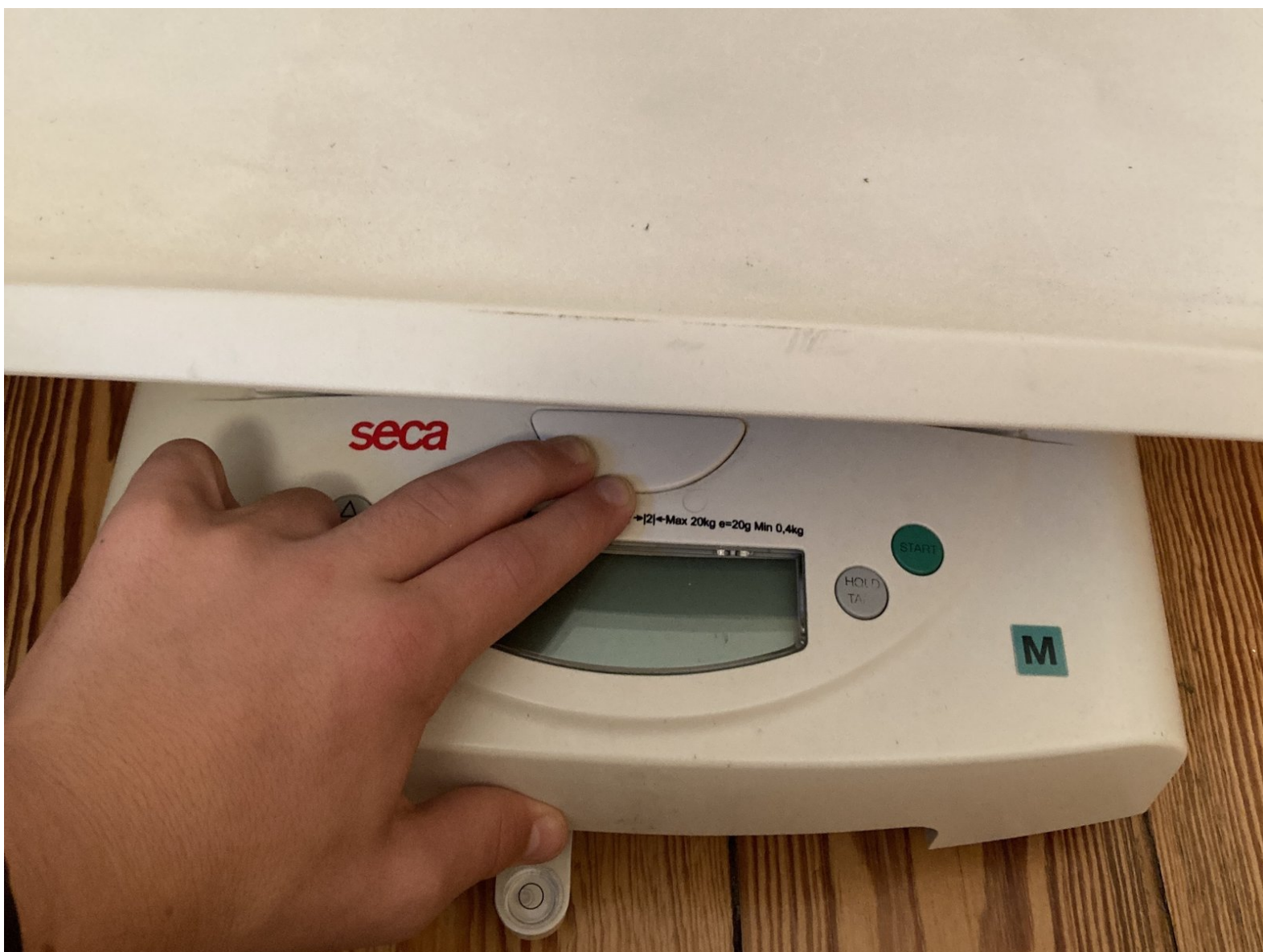

EINLEITUNG

Wenn sich einer der Bedientasten des Geräts klemmen, ist die Waage nicht mehr nutzbar. Durch ein Auseinandernehmen kann das Problem gelöst werden.



Warnung: das medizinische Gerät muss dafür auseinander genommen werden. Dabei erlischt Garantie und ggf. die Eichung!



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitzschraubendreher PH 2 \(1\)](#)
-

Schritt 1 — Bedientasten

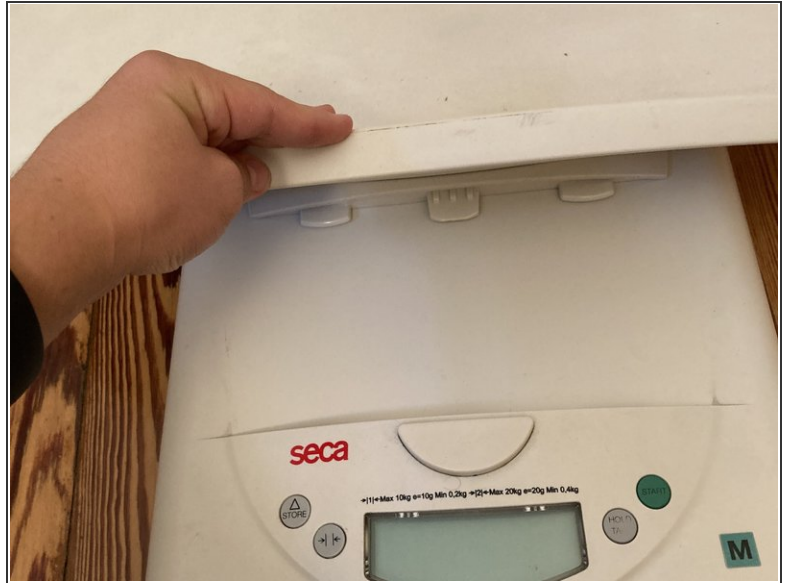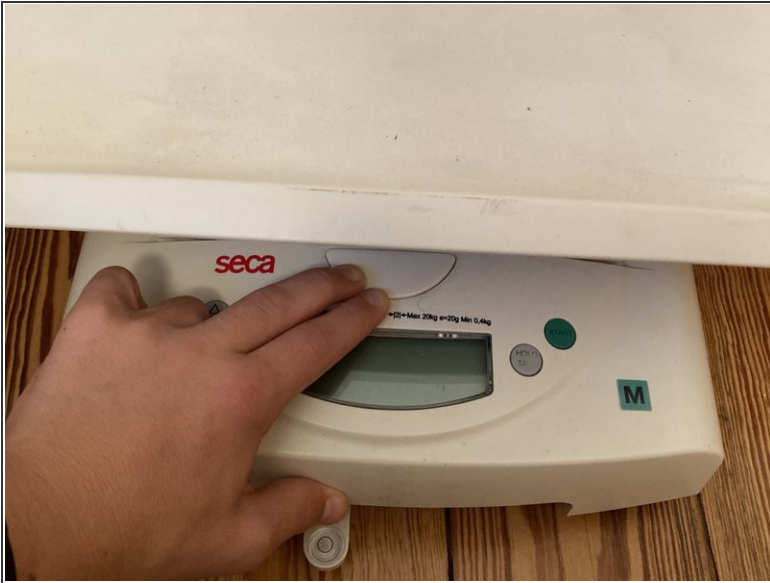


- Drücke die Losstell-Taste, schiebe die Waagschale nach hinten weg und nimm sie ab.
- ⓘ Dieser Schritt ist theoretisch nicht notwendig, vereinfacht den restlichen Prozess aber erheblich.

Schritt 2




- Drehe die Waage um.
- Entferne vorsichtig die vier Abdeck-Kappen mit einem Spudger oder einem Schlitz-Schraubendreher.
- ⓘ Wahrscheinlich musst du hierfür Eich-Sticker zerstören.

Schritt 3

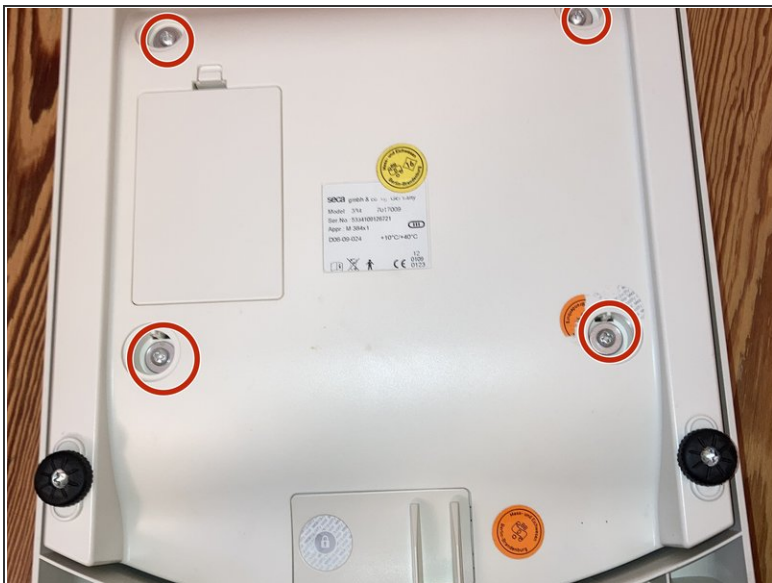

- Entferne die vier 9mm Phillips #2 Schrauben und die Unterlegscheiben.


Schritt 4

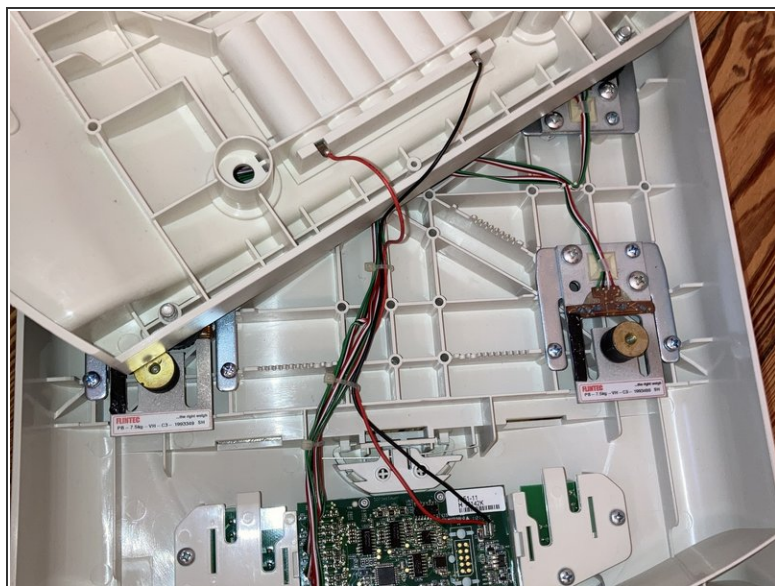

- Hebe die Bodenplatte ab, bewege sie zur Seite. Drehe sie um und lege sie auf das Gehäuse.

⚠ Sei dabei sehr vorsichtig, dass die Kabel des Batteriefachs nicht zerstört werden.

Schritt 5

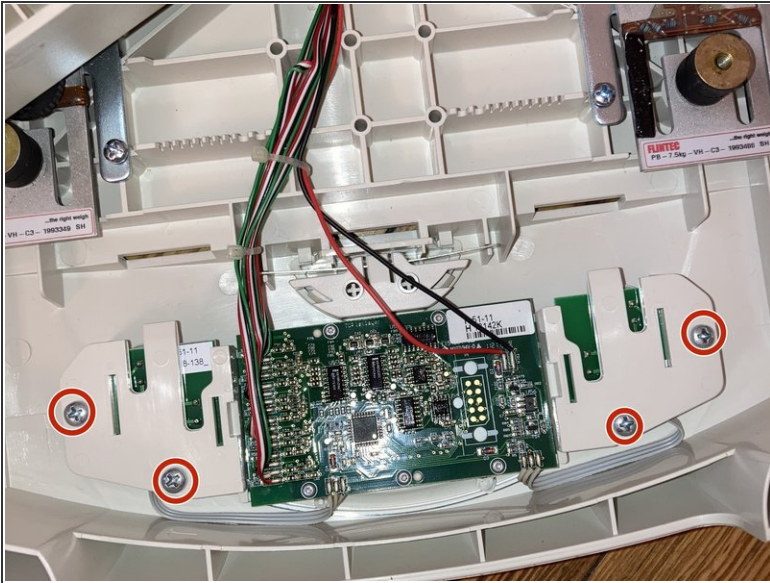

- Entferne die vier 10mm Phillips #2 Schrauben.
- ☞ Diese Schrauben haben, anders als die Gehäuse-Schrauben einen spitzen Gewinde. Verstausche sie nicht.
- Dann kannst du das Kontroll-Board abnehmen.

Schritt 6



- Überprüfe die fehlerhafte Taste auf Verschmutzungen wie Sand oder ähnlichem.
- ❗ Oft hilft schon das einfache Auseinandernehmen und wieder Zusammensetzen.
- Probiere ob die Taste jetzt wieder gedrückt werden kann.
- ❗ Nutze ggf etwas Schmiermittel auf den Tasten, so dass sie gut gleiten.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.